


Kainalosauva Black:

Kainalosauva tulee säätää käyttälleen sopivaksi.

Korkeus säädetään painamalla tuotteen putkien läpi menevä painike molemmilta puolilta putken sisään ja asettamalla sitten haluttu korkeus.

Varmista, että korkeussäätö lukkiutuu ja säädön tappi on näkyvissä molemmin puolin putkea.

Otekahvan korkeutta saa säädettyä avaamalla ja poistamalla siipimutterin ja vetämällä toiselta puolelta kahvan läpi menevän pultin ulos. Aseta kahva haluttuun korkeuteen ja paina pultti taas läpi kainalosauvan runkoputkesta, kahvaosasta ja taas toisesta putkesta, niin että kahva on vaakasuorassa.

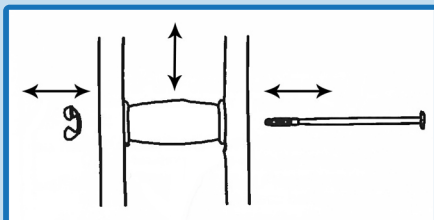

Kiristä siipimutteri ja varmista, että se on kunnolla kiinni!