

Tuotteen vääränlainen käyttö tai säätö saattavat johtaa tuotteen tai käyttäjän yllirasitukseen. Neuvottele aina ennen käyttöä ammattilaisen kanssa oikeanlaisen laitteen ja sinulle sopivien säätöjen valitsemiseksi. Pidä tuotetta mahdollisimman lähellä kehoasi liikkeessäsi välttääksesi onnettomuuksia. Liiku eteenpäin rauhallisesti ja lyhyin askelin pitääksesi tasapainosi.

Kyynärsauvan pituus tulee säätää käyttäjälleen sopivaksi. Löysää hiljennyskiristintä (1) ennen säätämistä (mallista riippuen kääntämällä vastapäivään tai vetämällä alaspäin). Irroita pikalukitusklipsi (2), säädä sisempi putki sopivaan korkeuteen ja paina klipsi takaisin paikalleen. Kiristä hiljennyskiristin kääntämällä myötäpäivään tai painamalla sitä ylöspäin kohti mansettia.

Painonapilliset mallit: Paina korkeussäätönappula rungon sisään ja valitse haluttu korkeus.



Varmista aina, että korkeussäädöt ovat kunnolla lukkiutuneet!

Varo, ettet jätä sormiasi tai muita kehon osia väliin tuotetta käsitellessäsi.



2

PESU ja KUIVAUS

Kyynärsauvat tulee puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee ne puhtaalla vedellä ja kuivaa sitten kankaalla. Tarkasta ettei vettä jää putken sisään!

Vaikeiden tahrojen poistoon suositellaan käytettäväksi rasvaa liuottavia puhdistusaineita, ph-arvo 5-9 tai 70% desinfiointiainetta. Pesulämpötila max. 80°C.



HUOM! Älä koskaan käytä öljyisiä aineita! Liukastumisvaara!

Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä tai – aineita, äläkä vahvoja liuottimia!

HUOLTOTOIMENPITEET

Kumitulppa tulee tarkistaa ja vaihtaa, jos se on vioittunut tai siinä on paljon kulumaa.


Poista kumitulppa vetämällä se irti putkesta. Asenna uusi kumitulppa painamalla putki tulpan pohjaan asti. Varmista aina, että kumitulpan koko ja malli on oikea!

Tarkista myös jääpiikin kunto (mikäli sovellettavissa). Varmista, että kiinnitys pitää ja ruuvit ovat tarpeeksi kireät. Tarkista, että piikki on tarpeeksi terävä. Vioittunut tai kulunut jääpiikki tulee vaihtaa uuteen.

Taipunutta tai vahingoittunutta tuotetta ei saa käyttää. Kyynärsauvaa ei saa yrittää korjata suoristamalla, sillä sen rakenne saattaa heikentyä ja se saattaa katketa.

Korjauksissa ja huolloissa on suositeltavaa käyttää vain alkuperäisvaraosia.

Käyttämällä alkuperäisvaraosia varmistat CE-hyväksynnän sekä takuun voimassaolon.

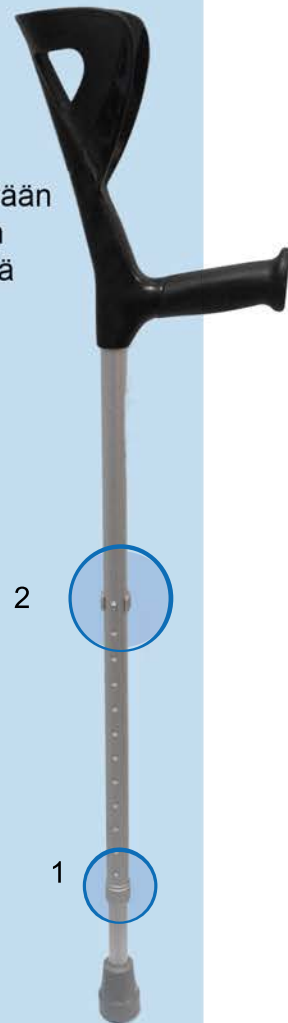

1

