

Installation:

Ta bort ringen och locket på toaletsitsen (de flesta modeller släpps genom att lyfta). Ifall toaletsitsförhöjarens installation lyckas utan att ta bort ringen eller locket, kan de också lämnas på sina platser. I så fall lyft upp ringen och locket före installationen.

Fäst monteringsklämmor till sidorna av höjaren som visas i bilden. Monteringsplatta är monterad så att den är placerad i fördjupningen på botten av höjaren och tryck lätt. Vrid fästskruven så att den rör sig inåt.

Placera höjaren på toaletsitsen. Dra åt monteringsklämmor genom att dra åt skruvarna så att dynorna pressas mot toalettstolens ytterkant och konsolen är på plats.



Lossning och fastgörning av höjaren görs genom att lossa eller dra åt skruvarna på fästena.

Kontrollera att höjaren är ordentligt på plats. Höjaren är klar för användning.

Borttagning av höjaren:

Lossa monteringsklämmor genom att vrida skruvarna. Fästena släpps och du kan lyfta höjaren ur toaletsitsen.

**Rengöring:**

Produkten rengörs genom att sudda med en fuktig trasa och mildt desinficerande medel. Produkten kan också duschas ren. För borttagning av svåra fläckar rekommenderas fettlösande rengöringsmedel med ph-värde 5-9 eller 70% desinfektionsmedel.

Fullständiga bruksanvisningar på våra produkter hittar du här:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

**KOLLA PRODUKTENS ALLMÄNNA SKICK REGELBUNDET OCH
ATT MONTERINGSKLÄMMÖR SITTER VÄL FAST.**

Felaktiga produkter skall vårdas vid egen hjälpmedelscentral!