

Jääpiikin asennusohje

Irroita ruuvit ja vastalevy jääpiikistä.
Käytä ristipäistä ruuvimeisseliä.

Aseta jääpiikin runko-osa kävelukepin tai kyynärsauvan alaosaan lähelle kumitulppaa, niin että piikkiosa on kepin/ sauvan takapuolella. Näin se ei jää kiinni esim. housun lahkeeseen ollessaan pois käytöstä.



Tarkista ennen ruuvien kiristystä, että piikki asettuu suoraan kumitulpan pohjaa vasten ollessaan käyttöasennossa.

Kiristä molempia ruuveja vuorotellen kunnes jääpiikki on tiukasti kiinni kepin/sauvassa. (Kyynärsauvan paksummassa putkessa levyt eivät kosketa toisiaan vaikka ruuvi on kiristetty pohjaan.)

Tarkista ruuvien kireys aina ennen käyttöä!

