

KÄYTTÖOHJEET

Kävelykepit sekä kyynär- ja kainalosauvat

Tuotteen vääränlainen käyttö tai säätö saattavat johtaa tuotteen tai käyttäjän yllärasitukseen. Henkilökunnan tulee säätää tuote sopimaan käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin.

Pidä tuotetta mahdollisimman lähellä kehoasi liikkeessäsi välttääksesi onnettomuuksia. Liiku eteenpäin rauhallisesti ja lyhyin askelin pitääksesi tasapainosi.

Kyynärsauvat ja kävelykepit:

Kyynärsauvan ja/tai kävelykepin pituus tulee säätää käyttäjälleen sopivaksi. Irroita pikalukitusklipsi, säädä sisempi putki sopivaan korkeuteen ja paina klipsi takaisin paikalleen.

Kävelykeppi Walker Soft: Paina korkeussäätönappula rungon sisään ja valitse haluttu korkeus.

Varmista aina, että korkeussäätö on kunnolla kiinni!
Varo, ettet jätä sormiasi tai muita kehon osia väliin tuotetta käsitellessäsi.



Kainalosauva Black:

Kainalosauva tulee säätää käyttälleen sopivaksi.

Korkeus säädetään painamalla tuotteen putkien läpi menevä painike molemmilta puolilta putken sisään ja asettamalla sitten haluttu korkeus.

Varmista, että korkeussäätö lukkiutuu ja säädön tappi on näkyvässä molemmin puolin putkea.

Otekahvan korkeutta saa säädettyä avaamalla ja poistamalla siipimutterin ja vetämällä toiselta puolelta kahvan läpi menevän pultin ulos. Aseta kahva haluttuun korkeuteen ja paina pultti taas läpi kainalosauvan runkoputkesta, kahvaosasta ja taas toisesta putkesta, niin että kahva on vaakasuorassa.

Kiristä siipimutteri ja varmista, että se on kunnolla kiinni!

