


## Kyynärtuellinen ohjaintanko (tuotenumero.: 338010)

Irrota musta pikalukitusklipsi ohjaintangon toisesta päästä ja aseta se sivuun myöhempää käyttöä varten. Aseta kyynärtuet ohjaustankoon. Tuot ovat värikoodattu ohjaustangon kanssa - sininen menee vasemmalle ja vihreä oikealle puolelle.

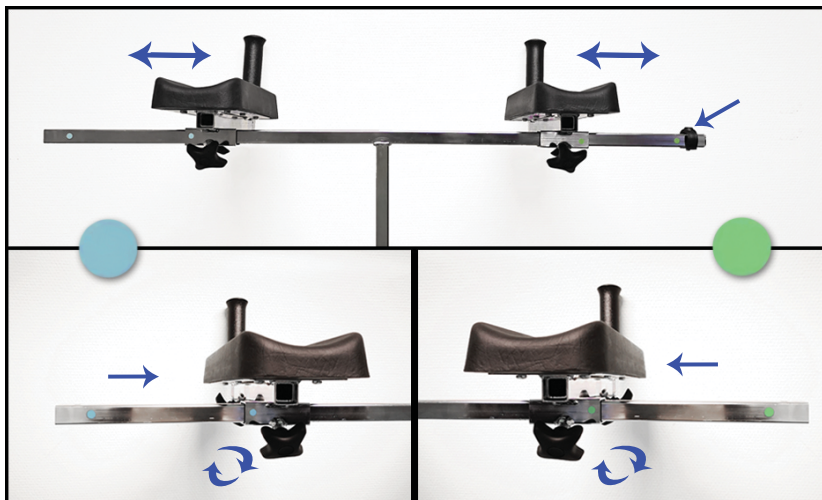

kuva 1

Tukien etäisyyttä voidaan säätää käyttäjän mukaan. Valitse sopiva etäisyys ja kiristä sormiruuvit. Varmista, että ne on kiristetty kunnolla! (kuva 1)

Myös kyynärtuen otekahvan syvyyttä voidaan säätää. Avaa sormiruuvi, valitse sopiva syvyys ja kiristä. (kuva 2)

**HUOM! Turvarajamerkintä (pieni reikä) on merkitty otekahvan putkeen. Kahvan syvyys on valittava niin, että merkintä ei jää näkyviin (kuva 2).**



kuva 2

Mukana tuleva avustajan kahva voidaan asettaa ohjaustangon kumpaan tahansa päähän. Sen syvyys on säädettävissä. Valitse sopiva syvyys ja lukitse kahva pikalukitusklipsillä. (kuva 3)



kuva 3

Avaa rungon korkeudensäädön sormiruuvi. (Jos kyynärtuellinen ohjaintanko tilattiin jälkikäteen lisävarusteena, irrota tavallinen ohjaintanko rungosta ensin.) Aseta kyynärtuellinen ohjaintanko rungon sisään. Valitse sopiva korkeus ja kiristä käsipyörä. Varmista, että se on kunnolla kiristetty! (kuva 4)



kuva 4



kuva 5

**HUOM!**

**Ohjaustangon putken päähän on merkitty turvarajamerkintä (pieni reikä). Korkeus on valittava niin, että merkintä ei jää näkyviin (kuva 5).**