
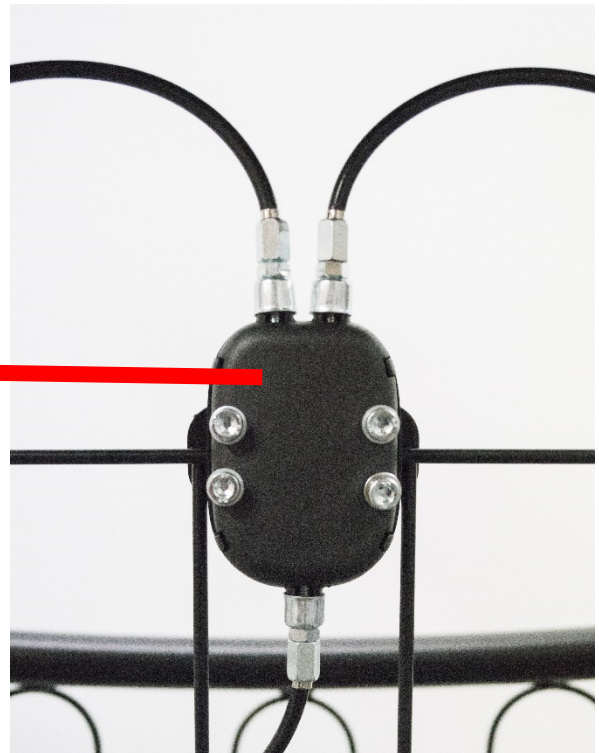


YHDEN KÄDEN JARRUAISAN / HEMITYÖNTÖAISAN ASENNUS

Paketti sisältää täydellisen työntöaisan tai hemityöntöaisan yhden käden jarrulla (molemmissa mukana jarruvaijerit, jakaja sekä jouset.) Lisäksi mukana tulee kiinnitystä varten metallinen kiinnityslaatta sekä sen tarvikkeet (kuusiokoloruuvi x 4, aluslevy x 4, jousialuslevy x 4 ja hattumutteri x 4).

Aseta hemityöntöaisa molempiin putkiin tai työntöaisa paikoilleen halutulle puolelle. Tuo vaijerit jakajineen istuinputken alta rollaattorin takapuolelle. Kiinnitä jakaja rollaattorin penkin alle korin ylimpään lankaan kiinnityslevyllä ja tarvikkeilla: aseta tavallinen aluslevy kuusiokoloruuviin ja paina sen jälkeen ruuvi jakajan ja kiinnityslevyn rei'istä läpi. Aseta toiselle puolelle jousialuslevy sekä hattumutteri. Kiristä käyttäen 8 mm lenkkiavainta sekä 4 mm kuusiokoloavainta.

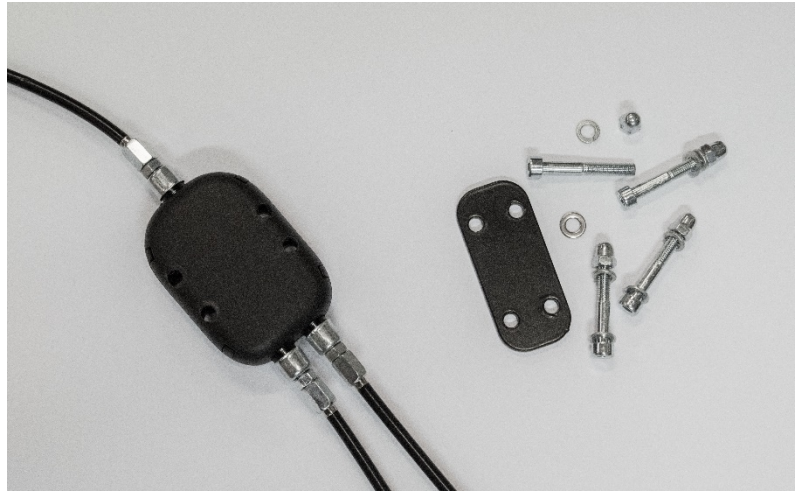

Yllä kiinnike ja korin ulkopuoli.

Vieressä kiinnike ja korin sisäpuoli.

Maunoihin on saatavilla pidempi jarrukenkä, joka helpottaa yhden käden jarrun toimivuutta, tuotenumero 338644-96. Ei sovi Paavoihin.

Irrota rengas takahaarukasta. Löysää jarruja ja irrota jarruvaijerin pää jarrukengästä. Irrota tavallinen jarrukenkä ruuvaamalla haarukan läpi menevä urapidätin ruuvi irti. Ota jarrun palautusjousi pois jarrukengästä. Asenna pidennetty jarruohjain kiinni laitteen takarungossa olevaan kiinteään jarruohjaimen kuusiokoloruuvilla (huomaa laittaa aluslevy ruuvin ja kävelytelineen rungon väliin). **HUOM! Käytä ruuvilukitetta (keskikova) ettei ruuvi pääse aukeamaan ajan kuluessa!**

Aseta jarrun palautus jousi pidennettyyn jarrukenkään pakoilleen, asenna jarrukenkä takahaarukkaan ja ruuvaa urapidätinruuvi tiukasti pohjaan asti, niin että se lukkiutuu eikä aukene itsellään. Aseta jarruvaijerin pää pidennetyn jarruohjaimen läpi ja jarrukengän uraan. Kiinnitä rengas takaisin paikoilleen. Säädä jarrut toimiviksi. Kiinnitä vaijerit runkoon rollaattorissa olleilla vaijerinpidikkeillä.

